



EN

## myTines ring extremities autoclavable

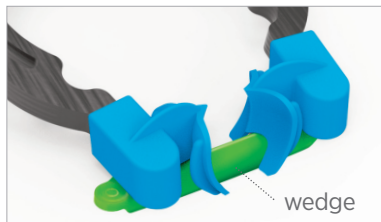

### CORRECT POSITIONING

The v-shaped section of myTines must face downwards to accommodate the wedge.

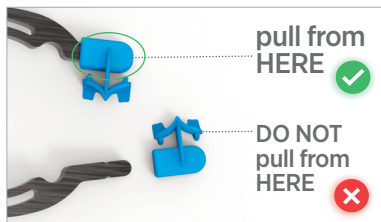

### CORRECT DISASSEMBLY


Remove myTines by pulling from their main body. **Do not pull from their wings.**



Scan for instructions for use & Cleaning and Sterilization Guide or go to [polydentia.ch](http://polydentia.ch)


DE

## myTines Ring- Extremitäten autoklavierbar

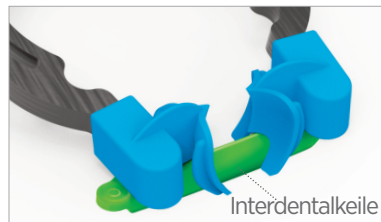

### KORREKTE POSITIONIERUNG

Der V-förmige Teil von myTines muss nach unten zeigen, um den Keil aufzunehmen

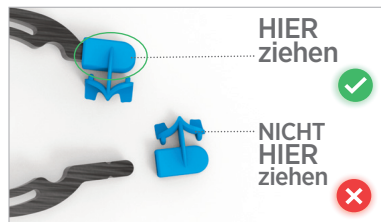

### KORREKTE DEMONTAGE


Entfernen Sie die myTines, indem Sie an ihrem Hauptkörper ziehen. Ziehen Sie nicht an den Flügeln.



Bitte einscannen, um Zugang zur Gebrauchsanweisung und zu den Empfehlungen zum Reinigen und Sterilisieren zu erhalten – oder besuchen Sie [polydentia.ch](http://polydentia.ch)


FR

## myTines extrémités pour anneaux autoclavable

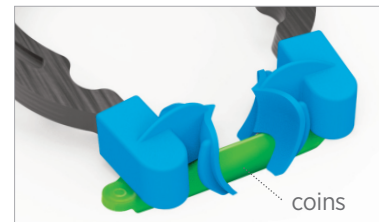

### POSITIONNEMENT CORRECT

La section en forme de V de myTines doit être orientée vers le bas pour accueillir le coin.

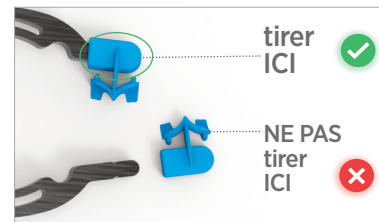

### DÉMONTAGE CORRECT


Retirez les myTines en les tirant par le corps principal. **Ne pas tirer sur les ailes.**



Scanner pour consulter le mode d'emploi et le guide de nettoyage et de stérilisation ou aller sur [polydentia.ch](http://polydentia.ch)


IT

## myTines estremità per anelli autoclavabili

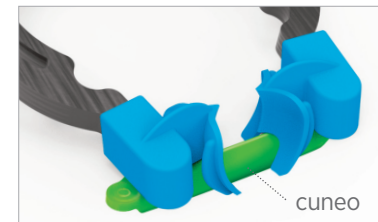

### POSIZIONAMENTO CORRETTO

La sezione a V di myTines deve essere rivolta verso il basso per accogliere il cuneo.

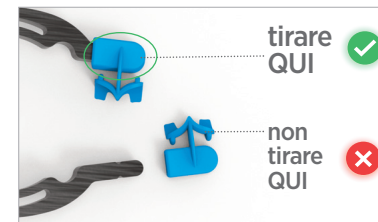

### SMONTAGGIO CORRETTO


Rimuovere i myTines tirando dal corpo principale. **Non tirare dalle ali.**



Scansionare per accedere alle Istruzioni per l'uso e alla Guida per la pulizia e la sterilizzazione oppure consultare il sito [polydentia.ch](http://polydentia.ch)


ES

## myTines extremidades anulares autoclavable

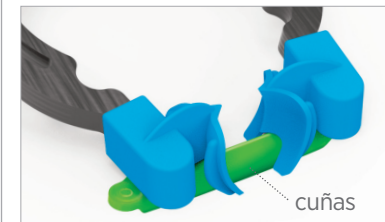

### POSICIONAMIENTO CORRECTO

La sección en forma de V de myTines debe mirar hacia abajo para acomodar la cuña

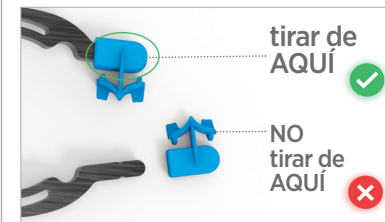

### DESMONTAJE CORRECTO

Retire myTines tirando de de su cuerpo principal. **No tire de las alas.**



Escanee para acceder las instrucciones de uso y a la guía de limpieza y esterilización, o visite [polydentia.ch](http://polydentia.ch)