



polydentia
swiss manufacture 

CASO CLINICO

faccette dirette in composito con Unica Proximal

per gentile concessione del
Dr. Mohammed Al Hasani
Iraq



Dr. Mohammed Al Hasani, Iraq



Il Dr. Al Hasani si è laureato in Odontoiatria presso l'Università di Babilonia nel 2017. Ha frequentato numerosi corsi nazionali e internazionali di odontoiatria restaurativa, concentrandosi principalmente sui restauri diretti in composito. Nel 2020 ha completato un corso di diploma professionale Styleitaliano in Iraq. Il dottor Al Hasani attualmente tiene corsi di restauro diretto in composito, concentrandosi sui restauri posteriori in composito, condividendo la sua passione professionale sia sul territorio iracheno che all'estero.

prodotto utilizzato

I prodotti Polydentia utilizzati in questo caso clinico sono:



Unica Proximal

Matrici anteriori



myWedge

cunei interprossimali in plastica

faccette dirette in composito con Unica Proximal

Case report

Il/La paziente si è rivolto/a allo studio per una riabilitazione estetica; l'analisi ha rivelato la presenza di restauri in composito vecchi e danneggiati sugli incisivi 11 e 21 che necessitavano di essere sostituiti.

Il seguente caso illustra passo dopo passo un restauro diretto in composito con Unica Proximal.

preoperatorio

preparazione della
cavità

posizionamento
matrice

restauro

risultato



01



Vista preoperatoria degli incisivi centrali 11 e 21 isolati. Per prima cosa sono stati rimossi i vecchi restauri e il campo operatorio è stato pulito e disinfettato.

preoperatorio

preparazione della
cavità

posizionamento
matrice

restauro

risultato



02



Sono state posizionate le matrici anteriori Unica Proximal sugli incisivi 11 e 21.

La forma, ottimizzata per adattarsi ai denti anteriori, consente una migliore visibilità e un migliore accesso al campo chirurgico rispetto ad altre soluzioni come, ad esempio, il restauro posteriore.

03



Le proprietà autostabilizzanti delle matrici non richiedono cunei per rimanere in posizione.

preoperatorio

preparazione della
cavità

posizionamento
matrice

restauro

risultato



04



La parete prossimale dell'incisivo 11 è stata restaurata per prima; quindi è stato utilizzato un myWedge per migliorare la stabilità della matrice. La forma a V cava consente al cuneo di comprimersi e adattarsi all'anatomia interprossimale del dente senza compromettere il contorno prossimale.

05



Incisivi 11 e 21 dopo il restauro delle pareti prossimali che mostrano la morfologia prossimale naturale ottenuta con le matrici Unica Proximal

preoperatorio

preparazione della
cavità

posizionamento
matrice

restauro

risultato



06



Ricostruzione delle superfici palatali dei denti 11 e 21.

07



Situazione clinica dopo la stratificazione in composito delle superfici degli incisivi labiali e prima della rifinitura e lucidatura.

preoperatorio

preparazione della
cavità

posizionamento
matrice

restauro

risultato



08



Rifinitura e lucidatura.

09



Risultato finale - vista frontale.

faccette dirette in composito con Unica Proximal

Conclusioni

Unica Proximal, concepita in collaborazione con StyleItaliano, grazie al suo design particolare semplifica i restauri anteriori e ne velocizza l'esecuzione. La sua forma è un'avanguardia rispetto alle matrici posteriori convenzionali, in quanto permette di restaurare allo stesso tempo mesialmente e distalmente, con pieno controllo e visibilità dell'area chirurgica. In questo modo è possibile ottenere un risultato più prevedibile.

caso clinico per gentile concessione del Dr Mohammed Al Hasani, Iraq



MKTG-0094-CC-IT REV 00 04.2024 © Polydentia SA, 2024. Tutti i diritti riservati. Polydentia, il logo Polydentia e tutti gli altri marchi commerciali sono marchi commerciali di Polydentia, salvo diversamente indicato o se reso evidente dal contesto in un determinato caso. Le immagini dei prodotti non sono necessariamente in scala. Limitazione di responsabilità: Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili per la vendita in tutti i Paesi. Contattare il distributore Polydentia locale (www.polydentia.ch/en/distributors/) per informazioni sull'assortimento e la disponibilità dei prodotti. I prodotti Polydentia citati sono solo per uso professionale. Non tutti i dispositivi medici utilizzati durante il caso studio erano dispositivi Polydentia. La procedura completa non è mostrata. Alcune sequenze sono state omesse. Per le istruzioni complete, consultare le relative Istruzioni per l'uso, se disponibili. Polydentia è un produttore di dispositivi medici e non fornisce consigli medici. Polydentia non si assume alcuna responsabilità per lesioni ovvero danni a persone o cose derivanti dalla riproduzione del presente caso clinico. Lo scopo di questo caso clinico non è di raccomandare misure, tecniche, procedure o prodotti, né di elargire consigli. Inoltre, non sostituisce la formazione medica ovvero il proprio giudizio clinico come professionista della salute. Gli spettatori non dovrebbero mai ignorare il parere di un medico professionista ovvero ritardare la ricerca di un trattamento medico a seguito di quanto visto nel presente caso clinico. Le opinioni espresse sono quelle del singolo medico. I medici sono tenuti a usare il proprio giudizio professionale nel trattare i propri pazienti. I risultati possono variare da paziente a paziente.

thanks for your attention!

Contact us

 Via Cantonale 47, 6805 Mezzovico-Vira, Switzerland

 info@polydentia.ch

 www.polydentia.ch

Follow us

 facebook.com/polydentia

 [@polydentia](https://www.instagram.com/polydentia)

 www.youtube.com/user/POLYDENTIASA

