

# unica anterior



powered by:  
**STYLE ITALIANO**<sup>TM</sup>

la soluzione  
per restauri  
anteriori

matrix  
systems



**polydentia**  
swiss manufacture 

1 Ricostruzione dei margini interprossimali e cervicali in un solo passaggio

2 Profilo anatomico per un restauro corretto dei margini interprossimali

3 Alette per posizionamento ed adattamento semplice della matrice

4 Gestione semplificata della zona cervicale: restauro prevedibile e/o retrazione gengivale

# unica anterior

powered by:  
**STYLEITALIANO™**



*"Nell'odontoiatria conservativa moderna, la scelta dei prodotti e delle tecniche che utilizziamo ogni giorno deve essere prevedibile e conveniente, incorporando chiari vantaggi nelle nostre procedure quotidiane. Unica è la soluzione per i restauri anteriori di tutti i giorni, che si tratti di classe III, IV, V, modifiche di forma e/o faccette in composito in tecnica diretta. Una matrice efficace per risultati anteriori estetici e funzionali quotidiani."*

Dr. Jordi Manauta, DDS  
Head of StyleItaliano Idea Factory  
Sestri Levante, Italia

Unica è la matrice ideale per effettuare i restauri anteriori quali Classe III, IV, V, faccette in composito in tecnica diretta, e modifiche di forma. Unica, grazie alla sua forma bombata si adatta in modo ottimale alle diverse morfologie dei denti anteriori e permette di ricostruire i margini interprossimali e cervicali in un solo passaggio, anche in presenza di diga o fili di retrazione gengivale, riducendo così il tempo necessario al restauro. Le alette della matrice permettono un posizionamento veloce ed efficace. Inoltre la matrice Unica, quando posizionata, permette al dentista di visualizzare la forma finale del restauro.



Faccette in  
composito

per maggiori  
informazioni



## kit



### Unica Introkit anterior - REF 6900

35 pz. Unica anterior matrici  
40 pz. myWedge XS  
40 pz. myWedge S  
40 pz. myWedge M  
1 pz. myCustom Resin, siringa da 3 ml  
7 pz. punte di ago calibro 18  
1 pz. myQuickmatrix Forceps, pinza

## ricariche



Unica anterior matrici  
REF 6912 12 pz.  
REF 6950 50 pz.



REF 5703  
myQuickmatrix Forceps



REF 7101  
myWedge  
Extrasmall (XS) 100 pz.



REF 7102  
myWedge  
Small (S) 100 pz.



REF 7103  
myWedge  
Medium (M) 100 pz.



REF 6811  
myCustom Resin  
siringa da 3 ml e 10 pz. punte di ago calibro 18

## Classe III restauro

Nel caso di una cavità di III Classe dove il margine prossimale è assente, Unica è molto utile in quanto permette al dentista di visualizzare la forma finale anche prima di procedere con il restauro.

Dr. Giuseppe Chiodera  
Brescia, Italia



per  
maggiori  
informazioni

## Classe IV restauro

Per questo restauro di IV Classe, Unica aiuta a ripristinare il profilo cervicale e interprossimale anatomicamente e in modo molto rapido.

Dr. Dan Lazar  
Oradea, Romania



per  
maggiori  
informazioni



Unica  
anterior  
matrices

myQuickmatrix  
Forceps



myCustom  
resin



myWedge



**Si**



**No**



Fissate Unica anterior con myCustom Resin, nel caso in cui il cuneo interdentale rischierebbe di deformare e/o spostare la matrice.

 **polydentia**  
swiss manufacture

## Classe V restauro

Nel caso di restauri di Classe V, la forma sagomata della matrice Unica aiuta il dentista a identificare e visualizzare il profilo cervicale prima di procedere con il trattamento. Il collare cervicale anatomico permette inoltre un comodo accesso al campo operatorio.

Dr. Giuseppe Chiodera  
Brescia, Italia



per  
maggiori  
informazioni


## Modifiche di forma

Il design particolare di Unica rende la matrice la soluzione essenziale per le modifiche di forma permettendo al dentista di restaurare contemporaneamente i margini interprossimali e cervicali.

Dr. Carlos Fernández Villares  
Madrid, Spagna



per  
maggiori  
informazioni

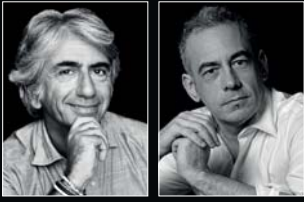

# Styleitaliano

fondato dal  
Dr. Walter Devoto e  
Prof. Angelo Putignano

*Style Italiano* è un gruppo di appassionati clinici dentisti e ricercatori, in costante sviluppo di materiali e tecniche per l'odontoiatria estetica e conservativa. La loro filosofia si basa sullo sviluppo di soluzioni per rendere l'eccellenza nell'odontoiatria estetica e funzionale accessibile a tutti.

Per Polydentia, la collaborazione con Style Italiano non è solo una fonte di ispirazione. È un'opportunità per rinnovare costantemente il suo impegno a mettere l'eccellenza della produzione svizzera al servizio dell'odontoiatria in tutto il mondo.



Visita “Unica  
Community”  
per condividere  
i casi clinici di  
*Unica anterior*

Seguici  
**#thinkunica**



Polydentia SA  
via Cantonale 47  
6805 Mezzovico-Vira  
Switzerland

phone: +41 91 946 29 48  
fax: +41 91 946 32 03

info@polydentia.ch  
www.polydentia.ch

